



# KURZANLEITUNG ARTROMOT®-K1

## Motorisierte Bewegungsschienen



Die ARTROMOT® Kniebewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen.  
Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.

## WARUM HAT DER ARZT IHNEN DIE BEWEGUNGSTHERAPIE VERORDNET?

- » um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen.
- » um die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern.
- » zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes.
- » zur Sicherung des Behandlungserfolgs

## WIE OFT SOLLEN SIE TÄGLICH ÜBEN?

- » Soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 4 bis 5 mal täglich je 60 Minuten empfohlen
- » Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

## WER HOLT DIE BEWEGUNGSSCHIENE WIEDER BEI IHNEN AB?

- » 3 Tage vor Ablauf der Verordnungszeit rufen Sie bitte Ihren Patientenbetreuer unter der nachstehenden Telefonnummer an und wir organisieren die Abholung.

## ERSTE SCHRITTE:

1. Netzstecker einstecken.
2. ARTROMOT-K1® am Netzschalter einschalten.
3. Patienten-Chipkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.



Patientenchipkarte

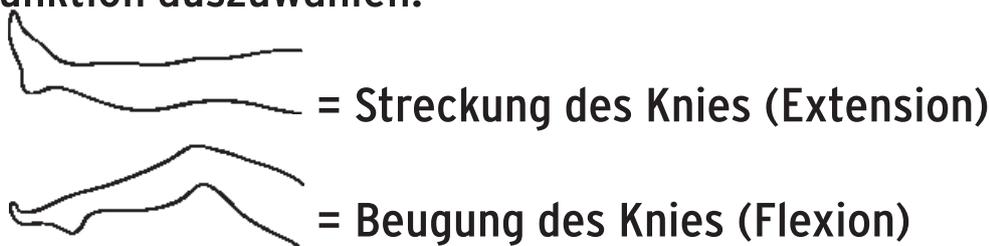
Zur Auswahl stehende Parameter und zugehörige Parametertasten

## DISPLAYANSICHT IM HAUPTMENÜ:



**Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.**

# PROGRAMMIERANLEITUNG<sup>1</sup> DES HANDGERÄTES:

1. Start drücken.
2. Menü-Taste kurz drücken. (Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden)
3. Taste unterhalb des gewünschten Bildes zur Verstellung drücken um Funktion auszuwählen.  


= Streckung des Knies (Extension)

= Beugung des Knies (Flexion)
4. Zum Verändern der Werte der ausgewählten Funktion: + oder - Taste drücken und gedrückt halten. Die Schiene fährt während der Einstellung

## DISPLAYANSICHT IM PROGRAMMIERUNGSMODUS



<sup>1</sup> Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf ARTROMOT®-K1 von DJO. Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung (MOT-303-Rev.13-09/2020) und ärztliche Einweisung. Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.



# Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung

**Sie haben Fragen?  
So erreichen Sie uns:**

**E-Mail: [info@kaechele24.de](mailto:info@kaechele24.de)**

**Telefon: 0800 - 0711 123**

**oder Sie besuchen uns an unseren Standorten**

Stuttgart Hauptstandort  
Rotebühlstr. 44  
70178 Stuttgart

Stuttgart  
Rosenbergstr. 19  
70176 Stuttgart

Stuttgart  
Grazer Str. 22  
70469 Stuttgart

Stuttgart  
Schwieberdinger Str. 54  
70435 Stuttgart - Zuffenhausen

Ludwigsburg  
Myliusstr. 3  
71638 Ludwigsburg