



KURZANLEITUNG ARTROMOT®-S3

Motorisierte Bewegungsschienen



Die ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.



WARUM HAT DER ARZT IHNEN DIE BEWEGUNGSTHERAPIE VERORDNET?

- » um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen.
- » um die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern.
- » zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes.
- » zur Sicherung des Behandlungserfolgs.

WIE OFT SOLLEN SIE TÄGLICH ÜBEN?

- » Soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 4 bis 5 mal täglich je 60 Minuten empfohlen
- » Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

WER HOLT DIE BEWEGUNGSSCHIENE WIEDER BEI IHNEN AB?

- » 3 Tage vor Ablauf der Verordnungszeit rufen Sie bitte Ihren Patientenbetreuer unter der nachstehenden Tele-fonnummer an und wir organisieren die Abholung.


ERSTE SCHRITTE:

1. Netzstecker einstecken.
2. ARTROMOT-S3® am Netzschalter einschalten.
3. Patienten-Chipkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.



DISPLAYANSICHT IM HAUPTMENÜ:

Aktueller Winkel der Bewegungsschiene in Abduktion/Adduktion

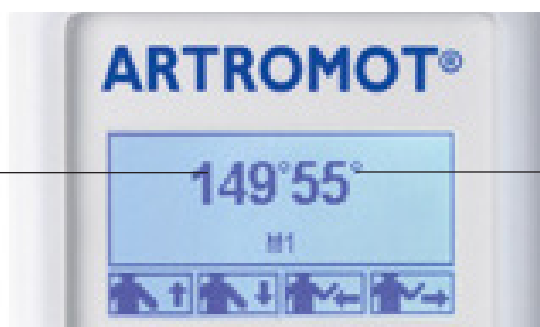

Aktueller Winkel der Bewegungsschiene Innen-/Außenrotation

Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.

PROGRAMMIERANLEITUNG¹ DES HANDGERÄTES:

1. Start drücken.
2. Menü-Taste kurz drücken. (Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden)
3. Taste unterhalb des gewünschten Bildes zur Verstellung drücken um Funktion auszuwählen.



seitliches **Heben** des Armes (Abduktion)



seitliches **Senken** des Armes (Adduktion)



Drehen des Armes nach **innen** (Innenrotation)



Drehen des Armes nach **außen** (Außenrotation)

4. Zum Verändern der Werte der ausgewählten Funktion: + oder - Taste drücken und gedrückt halten. Die Schiene fährt während der Einstellung die Bewegung mit.
5. Zum Speichern der Einstellung **Stop** drücken.

DISPLAYANSICHT IM PROGRAMMIERUNGSMODUS:

ausgewählte
Funktion

Aktivierter
Parameter
(hier Abduktion)



Aktueller programmiertes
Maximalwert der Ab-
duktion oder Außen-
rotation
(hier Abduktion)

Aktueller Winkel der
Bewegungsschiene
Ab-/Adduktion oder
Innen-/
Außenrotation

Aktueller
programmierter
Maximalwert der Ad-
duktion/Innenrotation

¹Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen mit Handkontroller „Grafik“ von DJO. Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung (MOT-321-Rev.9-08/2018) und ärztliche Einweisung. Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.



Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung

**Sie haben Fragen?
So erreichen Sie uns:**

E-Mail: info@kaechele24.de

Telefon: 0800 - 0711 123

oder Sie besuchen uns an unseren Standorten

Stuttgart Hauptstandort
Rotebühlstr. 44
70178 Stuttgart

Stuttgart
Rosenbergstr. 19
70176 Stuttgart

Stuttgart
Grazer Str. 22
70469 Stuttgart

Stuttgart
Schwieberdinger Str. 54
70435 Stuttgart - Zuffenhausen

Ludwigsburg
Myliusstr. 3
71638 Ludwigsburg