



# KURZANLEITUNG ARTROMOT®-S3

## Motorisierte Bewegungsschienen



Die ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.



## **WARUM HAT DER ARZT IHNEN DIE BEWEGUNGSTHERAPIE VERORDNET?**

- » um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen.
- » um die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern.
- » zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes.
- » zur Sicherung des Behandlungserfolgs.

## **WIE OFT SOLLEN SIE TÄGLICH ÜBEN?**

- » Soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 4 bis 5 mal täglich je 60 Minuten empfohlen
- » Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

## **WER HOLT DIE BEWEGUNGSSCHIENE WIEDER BEI IHNEN AB?**

- » 3 Tage vor Ablauf der Verordnungszeit rufen Sie bitte Ihren Patientenbetreuer unter der nachstehenden Tele-fonnummer an und wir organisieren die Abholung.

## ERSTE SCHRITTE:

1. Netzstecker einstecken.
2. ARTROMOT-S3® am Netzschalter einschalten.
3. Patienten-Chipkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.



## DISPLAYANSICHT IM HAUPTMENÜ:

Aktueller Winkel der Bewegungsschiene in Abduktion/Adduktion



Aktueller Winkel der Bewegungsschiene Innen-/Außenrotation

**Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.**

# PROGRAMMIERANLEITUNG<sup>1</sup> DES HANDGERÄTES:

1. Start drücken.
2. Menü-Taste kurz drücken. (Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden)
3. Taste unterhalb des gewünschten Bildes zur Verstellung drücken um Funktion auszuwählen.
  -  seitliches **Heben** des Armes (Abduktion)
  -  seitliches **Senken** des Armes (Adduktion)
  -  Drehen des Armes nach **innen** (Innenrotation)
  -  Drehen des Armes nach **außen** (Außenrotation)
4. Zum Verändern der Werte der ausgewählten Funktion: + oder - Taste drücken und gedrückt halten. Die Schiene fährt während der Einstellung die Bewegung mit.
5. Zum Speichern der Einstellung **Stop** drücken.

## DISPLAYANSICHT IM PROGRAMMIERUNGSMODUS:



<sup>1</sup>Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen mit Handkontroller „Grafik“ von DJO. Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung (MOT-321-Rev.9-08/2018) und ärztliche Einweisung. Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.



# Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung

**Sie haben Fragen?  
So erreichen Sie uns:**

**E-Mail: [info@kaechele24.de](mailto:info@kaechele24.de)**

**Telefon: 0800 - 0711 123**

**oder Sie besuchen uns an unseren Standorten**

Stuttgart Hauptstandort  
Rotebühlstr. 44  
70178 Stuttgart

Stuttgart  
Rosenbergstr. 19  
70176 Stuttgart

Stuttgart  
Grazer Str. 22  
70469 Stuttgart

Stuttgart  
Schwieberdinger Str. 54  
70435 Stuttgart - Zuffenhausen

Ludwigsburg  
Myliusstr. 3  
71638 Ludwigsburg